


+ Krok 4 – włączanie urządzenia

Uwaga: Urządzenie należy włączyć dopiero po przygotowaniu się do położenia się spać

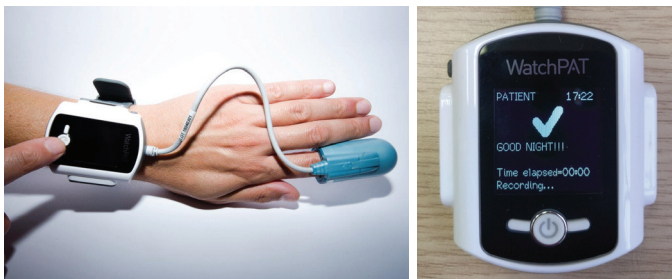

- 4a.** Mocno nacisnąć przycisk zasilania, aż włączy się wyświetlacz. Następny ekran „Prosimy czekać, trwa test...”
Po kilku sekundach pojawi się komunikat „DOBРАНОС!!!” ✓ . Wyświetlacz wyłączy się po krótkiej chwili.
- 4b.** W razie wystąpienia problemu i pojawienia się komunikatu „PRZERWANO TEST” ✗ , należy zadzwonić do działu technicznego pod numer 1-888-748-2627
- Teraz wszystko jest gotowe do snu.**
- 4c.** Jeśli palec nie znajduje się w pulsoksymetrze, pojawi się błąd instrujący o konieczności umieszczeniu palca w pulsoksymetrze. Zaczekać, aż urządzenie się wyłączy, włożyć palec i spróbować ponownie.

+ Krok 5 – w ciągu nocy

- Każde naciśnięcie przycisku uruchamia na chwilę wyświetlacz.
- Nie ściągać urządzenia ani czujników, jeśli wystąpi potrzeba, by wstać w nocy.
- Jeśli trzeba będzie wstać w nocy, nie należy naciskać żadnych przycisków.
- Korzystając z toalety, uważać, aby nie zamoczyć urządzenia WatchPAT™ 300.
- Urządzenie WatchPAT™ 300 nie powinno powodować żadnego dyskomfortu ani bólu. W razie wystąpienia niemożliwego do zniesienia dyskomfortu należy zdjąć urządzenie i skontaktować się z działem pomocy.

+ Krok 6 – następnego dnia rano

Po przebudzeniu:

- 6a.** urządzenie wyłączy się automatycznie. Nie jest ono wyposażone w wyłącznik.
- 6b.** Zdjąć pulsoksymetr i czujnik RESBP
- 6c.** Zdjąć urządzenie z nadgarstka.
- 6d.** Włożyć wszystkie części do futerału.

⚠ Ważne informacje:

- Nie należy próbować podłączać ani odłączać żadnych części urządzenia.
- Nie próbować wprowadzać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów.
- Nie próbować podłączać urządzenia WatchPAT™ 300 do źródła zasilania elektrycznego ani innego urządzenia, maszyny lub komputera.
- Pod żadnym pozorem nie podejmować prób samodzielnego rozwiązywania problemów z urządzeniem.
- Pulsoksymetr to produkt jednorazowego użytku. W przypadku podłączenia zużytego pulsoksymetru pojawi się komunikat o błędzie. Prosimy pamiętać, że używanie zużytego pulsoksymetru może spowodować zanieczyszczenie krzyżowe.
- W razie konieczności lub w przypadku poważnego wypadku należy skontaktować się z naszym pracownikiem serwisowym w celu zgłoszenia wypadku i uzyskania dalszych instrukcji. W przypadku poważnego wypadku należy to również zgłosić kompetentnemu właściwemu organowi.

Pytania?
Skontaktuj się telefonicznie z naszym
działem technicznym
1-888-748-2627

NR/REF: OM12193387 Rev.5 2023-02



Podręcznik Krok
po kroku

WatchPAT™ 300
Domowe badanie
bezdechu sennego



Film instruktażowy można zobaczyć tutaj:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

itamar
medical

| Zdrowie – nic prostszego

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Cały świat:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Izrael
Tel.: + 972 4 617 7000
Faks: + 972 4 627 5598

USA:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Tel.: 1 888 748 2627

EC REP Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Niemcy

Uwaga: Amerykańskie przepisy federalne ograniczają sprzedaż niniejszego wyrobu do sprzedaży wyłącznie przez licencjonowanego lekarza lub na jego polecenie.

Prawo autorskie © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT i PAT są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Itamar Medical Ltd., spółki zależnej ZOLL Medical Corporation, w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

WatchPAT™ 300 – podręcznik Krok po kroku

Z niniejszego podręcznika należy korzystać po otrzymaniu od lekarza instruktażu dotyczącego korzystania z urządzenia WatchPAT™ 300.



- A – przycisk zasilania
- B – czujnik chrapania związanego z wysiłkiem oddechowym/pozycji ciała (RESBP)
- C – pulsoksymetr

Przed zastosowaniem urządzenia WatchPAT™ 300:

- Zaleca się stosowanie urządzenia WatchPAT™ 300 na rękę niedominującą.
- Pulsoksymetr można zakładać na każdy palec z wyjątkiem kciuka. w przypadku dużych palców zaleca się użycie palca wskazującego.
- Przed użyciem zdjąć obcisłe części garderoby, pierścionki, zegarek i innego rodzaju biżuterię.
- Z palca, na który ma zostać założony czujnik, zmyć lakier do paznokci i — jeżeli ma to zastosowanie — zdjąć sztuczny paznokieć. Paznokieć naturalny krótko obciąć.

Uwagi:

- Po włączeniu urządzenia WatchPAT™ 300 nie można wyłączyć.
- Zastosować urządzenie i włączyć po przygotowaniu się do snu.
- Podczas zakładania urządzenia może być wymagany nadzór osoby dorosłej.
- Ilustracje w niniejszym podręczniku odnoszą się do lewej ręki, podobny proces można zastosować dla prawej ręki.




Futerak zawiera:

- Niniejszy podręcznik referencyjny
- Urządzenie z pulsoksymetrem
- Czujnik chrapania związanego z wysiłkiem oddechowym/pozycji ciała (Respiratory Effort Snoring and Body Position, RESBP)

Numer działu technicznego
1-888-748-2627



+ Krok 1 – zastosowanie czujnika chrapania związanego z wysiłkiem oddechowym/pozycji ciała (RESBP)

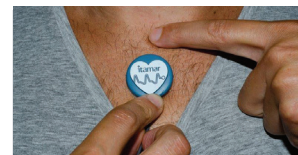

1a. W przypadku mężczyzn: w razie konieczności przyciąć gęste włosy na klatce piersiowej.

1b. Przeciągnąć czujnik RESBP przez rękaw piżamy, aż do otworu na szyję.



1d. Przyłożyć czujnik na środku klatki piersiowej, w górnej części mostka, tuż poniżej przedniej części szyi. Sprawdzić, czy obraz na czujniku RESBP jest skierowany do góry.



1c. Usunąć biały papier z tylnej strony czujnika.



1e. Zabezpieczyć czujnik RESBP dodatkową taśmą medyczną.

+ Krok 2 – zastosowanie urządzenia WatchPAT™ 300



2a. Przymocować urządzenie do ręki niedominującej.
2b. Zapiąć pasek na nadgarstku (niezbyt mocno).

+ Krok 3 – zakładanie pulsoksymetru



3a. Pulsoksymetr można zakładać na każdy palec z wyjątkiem kciuka. w przypadku dużych palców zaleca się użycie palca wskazującego.
3b. Umieścić palec w pulsoksymetrze, wsuwając palec do oporu. Naklejka oznaczona napisem TOP powinna znaleźć się na czubku palca (powyżej paznokcia).



3c. Przycisnąć końcówkę sondy do twardej powierzchni (np. stołu, nogi.)
3d. Pociągnąć etykietę TOP i całkowicie usunąć ją z pulsoksymetru.