

# WatchPAT™ ONE

Ühekordne kodune uneapnoe test

## WatchPAT™ ONE Green programm

WatchPAT™ ONE Green programmis\* osalemiseks peate pärast unetesti lõpetamist tegema järgmist:

1. Eemaldage aku WatchPAT™ ONE 'i seadmest ja pange seade karpi tagasi.
2. Külastage: [www.itamar-medical.com/greenprogram](http://www.itamar-medical.com/greenprogram), täitke vorm ja printige välja ettemakstud tagastussilt.
3. Kinnitage silt karbile ja saatke see meile tagasi - täiesti tasuta.

Aitäh, et aitate muuta maailma rohelisemaks!  
Teatud riikides on saadaval \*WatchPAT™ ONE Green programm.



### Olulised märkused:

- WatchPAT™ ONE on näidustatud patsientidele, kellel kahtlustatakse unega seotud hingamishäireid.
- WatchPAT™ ONE on ühekordselt kasutatav. Ühekordselt kasutatavate toodete korduvkasutamine võib põhjustada ristsaastumist.
- Tõsise vahejuhtumi korral pöörduge edasiste juhiste saamiseks oma tervishoiutöötaja ja Itamari teeninduse poole.
- Hoiustamis- ja töötemperatuurid 0°C - 40°C.
- Ärge proovige ühtegi seadme osa ühendada ega lahti ühendada.
- Ärge proovige seadmesse võõrkehi sisestada.
- Ärge mingil juhul proovige seadet WatchPAT™ ONE ise parandada.
- WatchPAT™ ONE ei tohi põhjustada ebamugavust ega valu. Kui tunnete talumatut ebamugavust, eemaldage WatchPAT™ ONE seade ja helistage kasutajatoele.
- Kontrollige akut enne paigaldamist visuaalselt ja veenduge, et see ei ole tursunud, pragunenud, lekkinud ega muude vigadega.
- Enne WatchPAT™ ONE kasutamist peab kliiniline personal patsienti koolitama.



Samm-sammuline videojuhend  
on saadaval aadressil  
[watchpatone-howtouse.com](http://watchpatone-howtouse.com)



Küsimuste korral võtke ühendust  
ZOLL Itamar™ 'i meditsiinilise  
kasutajatoega aadressil:  
1-888-748-2627

ZOLL itamar



**Itamar Medical Ltd.**  
9 Halamish Street, PO 3579  
Caesarea 3088900 Iisrael  
Tel: +972 4617 7000,  
Faks: +972 4627 5598

**EC REP Arazy Group GmbH**  
The Squire 12, Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main  
Saksamaa



[lp.itamar-medical.com/symbols-glossary](http://lp.itamar-medical.com/symbols-glossary)

2797

# WatchPAT™ ONE

Ühekordne kodune uneapnoe test



## Samm sammult juhised

Valige alltoodud  
QR-kood, et laadida  
alla WatchPAT™ ONE  
rakendus



ZOLL itamar

## WatchPAT™ONE | Samm-sammuline kasutusjuhend | Ühekordselt kasutatav kodune uneapnoe test

Käesolev juhend näitab teile samm-sammult, kuidas WatchPAT™ONE kodust uneapnoe testi õigesti kasutada.

### Enne WatchPAT™ONE kasutamist:

- + Veenduge, et teil on internetiühendus, telefon, WatchPAT™ONE seade ja PIN-kood.
- + Eemaldage kitsad riided, ehted ja aksessuaarid.
- + Valige oma mitte-juhtival käel sõrm, välja arvatud põial (kui teil on suured sõrmed, kasutage väikest sõrme).
- + Lõigake ja eemaldage valitud sõrmelt küünelakk või kunstküüned.

Märkus: Kasutage ainult Alkaline AAA-akut.


Ärge sisestage akut enne, kui olete valmis magama minema.

1. Laadige WatchPAT™ONE rakendus oma telefoni (saadaval App Store'is ja Google Play Store'is).

2. Avage WatchPAT™ONE rakendus ja lubage kõik taotletud õigused. Need õigused on rakenduse toimimiseks vajalikud. Võtke WatchPAT™ONE karbist välja. Võite klõpsata lühijuhendi lingile, et tutvuda rakendusega, kus näidatakse, kuidas seadet WatchPAT™ONE seadistada. Kui olete valmis, vajutage nuppu „alusta seadistamist“.

Alusta seadistamist

3. Sisestage aku WatchPAT™ONE seadmesse. Vajutage >, kui olete valmis.

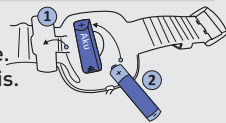

4. Ettevalmistus:

- Veenduge, et telefon on õõseks ühendatud ja ei ole lennurežiimis.
- Lülitage välja kõik ruumis olevad mittevajalikud elektroonikaseadmed.
- Veenduge, et teie telefon ei asu WatchPAT™ONE seadme juurest rohkem kui 5 meetri kaugusel.
- Andmete salvestamiseks on vaja vähemalt kuus tundi.

5. Sisestage meditsiinasutuse või teenusepakkuja antud nelja kohaline PIN-kood ja vajutage >.



6. Pange WatchPAT™ONE seade oma mittedomineeriva käe peale. Veenduge, et see ei ole liiga pingul ega liiga lõdvalt. Vajutage >, kui olete valmis.



7. Kui teie WatchPAT™ONE seadmel on rinnaandur:

- Vajadusel lõigake rinnakarvu, et tagada anduri kinnitumine otse naha külge.
- Lükake rinnaandur läbi varruka kuni kaelaavani.
- Eemaldage valge paber anduri tagaküljelt.
- Kinnitage andur ülemise rinnaluu keskele täpselt rangluu alla.
- Soovitav on andur meditsiinilise teibiga oma kohale kinnitada. Vajutage >, kui olete valmis.



8. Sisestage testitud sõrm täielikult sondi sisse. Käe tagaküljele vaadates veenduge, et ÜLEVAL olev kleebis oleks nähtav. Lükake sondi ots vastu kõva pinda (nt lauda) ja tõmmake ÜLEMIST sakk aeglaselt tagasi, et see sondilt eemaldada.



9. Uneuuringu alustamiseks klõpsake nuppu „alusta salvestamist“. Veenduge, et telefon oleks laadijaga ühendatud.

Alusta salvestamist

10. Hommikul vajutage nuppu „peata salvestamine“ ja oodake kuni WatchPAT™ONE seade lõpetab andmeedastuse. Pärast andmeedastuse lõpuleviimist saate õnnitlusteate.

Lõpeta salvestamine

Kui olete kätte saanud, vajutage nuppu „sulge rakendus“.

Sulge rakendus

11. Eemaldage rinnaandur, sond ja WatchPAT™ONE seade. Palun kõrvaldage WatchPAT™ONE seade vastavalt kohalikele eeskirjadele.