

WatchPAT™ ONE

בדיקה ביתית לדום נשימה בשינה לשימוש חד פעמי



לסרטון הדרכה שלב אחר שלב יש להיכנס לאתר
watchpatone-howtouse.com

WatchPAT™ ONE

בדיקה ביתית לדום נשימה בשינה לשימוש חד פעמי



מדריך למשתמש שלב אחר שלב

לשאלות ניתן ליצור קשר עם מוקד התמיכה של
ZOLL Itamar™ Medical
בטלפון:
1-888-748-2627

ZOLL itamar



ZOLL itamar

יש לסרוק את קוד ה-QR שלהלן כדי להוריד את האפליקציה WatchPAT™ ONE

EC REP **Arazy Group GmbH**
The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

איתמר מדיקל בע"מ
רחוב חלמיש 9, ת.ד. 3579
קיסריה, 3088900, ישראל
טל: 04-6177000,
פקס: 04-6275598



040219494 Rev.5 2023.12

⚠ הערות חשובות:

- מכשיר ה-WatchPAT™ ONE מותווה עבור מטופלים עם חשד להפרעות נשימה הקשורות לשינה.
- ה-WatchPAT™ ONE מיועד לשימוש חד פעמי. שימוש חוזר במוצרים חד פעמיים עלול לגרום לזיהום צולב.
- במקרה של אירוע חמור, צור קשר עם הרופא שלך ודלפק השירות של Itamar Medical לקבלת הוראות נוספות.
- טמפרטורות אחסון ותפעול 40°C - 0°C.
- אין לנסות לחבר או לנתק אף חלק מהיחידה.
- אין לנסות להכניס כל עצם זר למכשיר.
- בשום פנים ואופן אל תנסה לתקן את מכשיר ה-WatchPAT™ ONE בעצמך.
- ה-WatchPAT™ ONE לא אמור לגרום לכל סוג של אי נוחות או כאב. אם אתה חווה אי-נוחות בלתי-נסבלת, הסר את מכשיר ה-WatchPAT™ ONE והתקשר למוקד התמיכה.
- יש לבצע בדיקה חזותית של הסוללה לפני הכנסתה כדי לוודא שאין נפיחות, סדקים, דליפה או כל פגם אחר בסוללה.
- לפני השימוש ב-WatchPAT™ ONE, על הצוות הרפואי להדריך את המטופל.

תוכנית WatchPAT™ ONE Green

- כדי להשתתף בתוכנית WatchPAT™ ONE Green*, כל שיש לעשות הוא להשלים את בדיקת השינה ולאחר מכן:
1. להסיר את הסוללה ממכשיר ה-WatchPAT™ ONE ולהחזיר את המכשיר לאריזה שלו.
 2. לבקר באתר האינטרנט שבכתובת: www.itamar-medical.com/greenprogram, למלא את הטופס ולהדפיס את תונית ההחזרה לשליחה בדואר גוביינא.
 3. להדביק את התונית לאריזה ולשלוח אותה חזרה אלינו - ללא תשלום.
- תודה שעזרת ליצור עולם ירוק יותר!
*תוכנית WatchPAT™ ONE Green זמינה במדינות מסוימות בלבד.

מדריך זה כולל הסבר שלב אחר שלב של אופן השימוש הנכון בבדיקה הביתית לדום נשימה בשינה WatchPAT™ONE.


לפני התחלת השימוש ב-WatchPAT™ONE:

- + ודא שיש לך גישה לאינטרנט, ושהטלפון שלך, מכשיר WatchPAT™ONE וקוד ה-PIN שלך נמצאים ברשותך.
 - + יש להסיר בגדים צמודים, תכשיטים ואביזרים.
 - + בחר אצבע ביד הלא דומיננטית שלך, אך לא את האגודל (אם יש לך אצבעות גדולות, השתמש בזרת).
 - + יש לגזור את הציפורן ולהסיר לק או ציפורן מלאכותית מהאצבע שנבחרה.
- הערה: יש להשתמש רק בסוללת AAA אלקליון. אין להכניס את הסוללה עד שיגיע הזמן ללכת לישון.

1. הורד את האפליקציה WatchPAT™ONE לטלפון שלך (זמינה ב-App Store וב-Google Play Store).

2. פתח את אפליקציית WatchPAT™ONE והפעל את כל ההרשאות המבוקשות. הרשאות אלה נחוצות כדי שהאפליקציה תפעל. יש להוציא את מכשיר ה-WatchPAT™ONE מהקופסה. ניתן ללחוץ על קישור המדריך המהיר לסיור באפליקציה המדגים כיצד להגדיר את מכשיר מכשיר ה-WatchPAT™ONE. לחץ על "התחל התקנה" כאשר אתה מוכן.

התחל

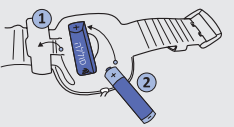

3. יש להכניס את הסוללה למכשיר ה-WatchPAT™ONE. לאחר הסיום יש ללחוץ על


4. הכנה:

- יש לוודא שהטלפון מחובר למטען לכל אורך הלילה, ושהוא אינו נמצא במצב טיסה.
- כבה את כל המכשירים האלקטרוניים בחדר שאינם נחוצים.
- יש לוודא שהטלפון שלך נמצא במרחק של לא יותר מ-5 מטרים ממכשיר ה-WatchPAT™ONE.
- יש להשלים לפחות 6 שעות של הקלטת נתונים.



5. יש להזין את קוד ה-PIN בן 4 הספרות שקיבלת מהמרפאה או מהספק, וללחוץ על

6. הנח את מכשיר ה-WatchPAT™ONE על היד הלא דומיננטית שלך. ודא שהמכשיר אינו הדוק מדי או רופף מדי. לאחר הסיום יש ללחוץ על

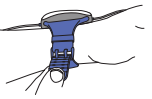

7. אם מכשיר ה-WatchPAT™ONE שלך כולל חיישן חזה:
- במידת הצורך, יש לקצץ את שיער החזה כדי להבטיח שהחיישן יוצמד ישירות לעור.
 - החלק את חיישן החזה דרך השרוול ועד לפתח הצווארון.
 - יש לקלף את מדבקת ההגנה הלבנה מגב החיישן.
 - יש להצמיד את החיישן למרכז החלק העליון של עצם החזה, בדיוק מתחת לשקע עצם החזה.
 - מומלץ לקבע את החיישן במקומו באמצעות סרט דביק רפואי.
 - לאחר הסיום יש ללחוץ על



8. הכנס את האצבע הנבדקת במלואה לתוך האצבעון. ודא שאתה רואה את המדבקה המסומנת במילה TOP כאשר אתה מביט על גב כף ידך.



דחוף את קצה האצבעון כנגד משטח קשה (כגון שולחן) ומשוך באיטיות את הלשונית המסומנת במילה TOP כדי להסיר אותה מהאצבעון.

9. לחץ על הלחצן "התחל הקלטה" כדי להתחיל בבדיקת השינה שלך. ודא שהטלפון נשאר מחובר למטען.

התחל הקלטה

10. בבוקר, לחץ על הלחצן "עצור הקלטה" והמתן עד שמכשיר ה-WatchPAT™ONE יסיים לשדר את הנתונים. בסיום שידור הנתונים תקבל הודעה המברכת אותך על השלמת הבדיקה.

עצור הקלטה

סגירת האפליקציה

לאחר שהתקבלה ההודעה יש ללחוץ על "סגירת האפליקציה".

11. יש להסיר את חיישן החזה, האצבעון ומכשיר ה-WatchPAT™ONE. יש להשליך את מכשיר ה-WatchPAT™ONE בהתאם לתקנות המקומיות.